

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/2x-szyna-relaksacyjna-nakladka-zgrzytanie-bruksizm-p-9755.html>



2x szyna relaksacyjna nakładka zgrzytanie bruksizm

Cena brutto	5,16 zł
Cena netto	4,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	262207246
Kod producenta	01705
Kod EAN	5907451332580

Opis produktu

2 X SZYNA RELAKSACYJNA NAKŁADKA DO WYBIELANIA ZGRZYTANIE BRUKSIZM

Zgrzytanie zębami i zaciskanie szczęki mogą prowadzić do wielu poważnych uszkodzeń – zarówno całości stawu skroniowo żuchwowego, jak i samych zębów.

Nakładki **pozwalają ustabilizować pozycję żuchwy i zapobiegają zgrzytaniu zębami w nocy.**

Czas noszenia szyn relaksacyjnych na zęby uzależniony jest od potrzeb każdego pacjenta.

Nakładki można stosować do wybielania zębów. Specjalne termoaktywne **nakładki pozwalają, aby żel dotarł wszędzie i optymalnie działał na całe zęby.**

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- 1.** Podgrzać wodę do temperatury bliskiej wrzenia.
- 2.** Umieścić ustawioną nakładkę pionowo w wodzie tak, aby była w pełni zanurzona przez około 20-30 sekund. Nakładka staje się bardziej przezroczysta. Nie należy dopuścić do sklejenia się jej ścianek na wskutek uplastycznienia materiału.
- 3.** Wyjąć nakładkę z wody. Przed włożeniem jej do jamy ustnej, sprawdzić palcami, czy nie jest zbyt gorąca.
- 4.** Umieścić nakładkę w jamie ustnej, tak jak przedstawiono na rysunku, zakrywając nią na kształt litery U cały łuk zębowy.
- 5.** Zaciśnąć usta i dociskając nakładkę za pomocą palców, policzków i języka przytrzymać przez 1-2 minuty, odsysając jednocześnie wodę z szyny.
- 6.** Ściągnąć nakładkę z łuku zębowego i ostudzić pod strumieniem zimnej wody (około 1 minutę)
- 7.** Nakładkę można odpowiednio dociąć, zapewniając w ten sposób niezbędną wygodę użytkowania. Należy pamiętać, że precyzyjne dopasowanie nakładki obniża zużycie żelu i gwarantuje optymalne użycie produktu

Uwaga: Jeżeli nakładka jest zbyt zimna aby dopasować ją do zębów lub jej ścianki skleły się, można powtórzyć operację nagrzewania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- ☐ Kod produktu: **01705**
- ☐ **Nakładka na uzębienie**
- ☐ Materiał termokurczliwy
- ☐ Nakładka **w uniwersalnym rozmiarze**
- ☐ **Nie jest produktem stomatologicznym**
- ☐ **W czasie noszenia nie zaleca się spożywania posiłków i**

gorących napojów

☐ Kolor: **przezroczysty**

ZESTAW ZAWIERA:

☒ Fabrycznie nowa nakładka termokurczliwa na zęby dwie sztuki