

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/poduszka-do-trakcji-szyi-ortopedyczna-trzy-poziomy-p-11833.html>



Poduszka do trakcji szyi ortopedyczna trzy poziomy

Cena brutto	77,24 zł
Cena netto	62,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	300935621
Kod producenta	24421
Kod EAN	5907451346198

Opis produktu

PODUSZKA DO TRAKCJI SZYI ORTOPEDYCZNA TRZY POZIOMY

Pompowana poduszka trzypoziomowa do trakcji szyi to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do rozciągania i ulgę w przypadku bólu szyi i kręgosłupa szyjnego. **Posiada trzy poziomy regulacji**, co umożliwia dostosowanie intensywności trakcji do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika..

KORZYŚCI:

- ☐ Redukcja bólu i napięcia mięśniowego w okolicach szyi.
- ☐ Rozciąganie i odciążanie kręgosłupa szyjnego.
- ☐ Poprawa elastyczności i ruchomości kręgosłupa szyjnego.
- ☐ Może przyczynić się do poprawy postawy kręgosłupa szyjnego.
- ☐ Trakcja szyi może poprawić krążenie krwi w obszarze szyi i mózgu, co może korzystnie wpłynąć na ogólną kondycję zdrowotną.

□ Zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z tego typu produktu, szczególnie jeśli osoba ma poważne problemy z kręgosłupem czy układem mięśniowo-szkieletowym.

Wykonana jest z wysokiej jakości, trwałego materiału, który zapewnia komfort i trwałość.

Posiada **trzy komory powleczone mięciutkim welurowym materiałem**, które można napełniać powietrzem w celu kontrolowania stopnia trakcji.

Dwie zewnętrzne poduszki **wyposażone są w troczki do zawiązywania**, pozwala to na utrzymania poduszki w odpowiedniej pozycji.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Użytkownik kładzie poduszkę pod szyją, a następnie pompuje komory
- powietrzem, aby uzyskać odpowiedni stopień naciągnięcia i trakcji.
- Dostosowanie poziomu napełnienia powietrzem umożliwia kontrolę nad stopniem trakcji i komfortem podczas użytkowania.
- Po zakończeniu terapii można powoli wypuścić powietrze z komór, aby zrelaksować kręgosłup szyjny.

Gruszka do pompowania powietrza wyposażona jest w **zakręcany zawór**, którym można regulować poziom powietrza gdy jest go zbyt dużo w poduszkach.

Jeśli potrzebujemy poruszać się w poduszce to po napompowaniu, można odłączyć kable i **zatkać wloty powietrza za pomocą zatyczek**.

Poduszki połączone są ze sobą napami, które wygodnie można rozpiąć i pozostawić dwie poduszki lub jedną.

Dodatkowo w zestawie dostępna jest mała podręczna pompka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- ☐ Kod produktu: **24421**
- ☐ Trzy poziomy do pompowania
- ☐ Relaksujący **sen bez bólu głowy, szyi, ramion i karku**
- ☐ Odprężenie dla **Twoich pleców i kręgosłupa**
- ☐ Wsparcie **dla szyjnego odcinka kręgosłupa**
- ☐ System wygodnego pompowania
- ☐ Pompka
- ☐ Troczki do wiązania poduszek
- ☐ Wymiary maksymalnie napompowanych poduszek: **26cm x 20cm x 23cm**

ZESTAW ZAWIERA:

- ☒ Fabrycznie nową poduszkę do trakcji szyi
- ☒ System do pompowania
- ☒ Pompka

- ☒ Oryginalne opakowanie